



E-WALK



GUIDA UTENTE



PRECAUZIONI

Innanzitutto, l'intero team di ErgoConcept desidera esprimere la nostra gratitudine per la fiducia accordataci nell'acquisto del modello E-WALK. Abbiamo cercato di garantire che la tua nuova sedia a rotelle ti offra completa soddisfazione. Non esitare a contattarci al seguente indirizzo: contact@ergoconcept.net per condividere qualsiasi feedback con noi.

Si prega di leggere questa guida NELLA SUA INTERESSA prima dell'uso. ErgoConcept declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni all'attrezzatura se la sedia non viene utilizzato rigorosamente con questa guida.

In questa guida gli avvertimenti sono indicati da pittogrammi. Si prega di fare riferimento alle spiegazioni riportate di seguito per comprendere meglio i punti specifici di attenzione



AVVERTIMENTO!

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare gravi danni fisici con conseguenti lesioni o morte.



DIVIETO!

Questo pittogramma indica un divieto che, se non rispettato, potrebbe portare a una situazione potenzialmente pericolosa, con conseguenti danni fisici.



ATTENZIONE!

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni fisici lievi o moderati



ACCOMPAGNAMENTO

Questo pittogramma indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare danni fisici se l'utente non è accompagnato.



PUNTO DI VIGILANZA

Questo pittogramma indica che è necessaria particolare attenzione durante la manipolazione del prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze materiali per la sedia a rotelle e una durata di vita ridotta del prodotto

RIASSUNTO

I / SPECIFICHE DEL PRODOTTO	4
II / MESSA IN SERVIZIO DELLA CARROZZINA	6
1. Installazione del joystick anteriore	7
2. Installazione del joystick posteriore	7
3. Connessione elettrica.....	8
4. Batteria in carica.....	9
III / METODO DI APERTURA E PIEGATURA DELLA SEDIA.....	12
IV/ REGOLAZIONI DEI COMPONENTI.....	14
1. Retrazione dei braccioli.....	14
2. Regolazione in altezza delle manopole del manubrio.....	14
3. Regolazione in altezza dello schienale.....	14
4. Freni a mano.....	15
4. Poggiapiedi.....	15
5. Il joystick.....	16
V / MODALITÀ DI GUIDA E DI FUNZIONAMENTO	17
VI/ MANUTENZION.....	23
VII / CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA.....	24
VII/ POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI.....	28
IX/ CONSERVAZIONE DEL DEMABULATORE	29
X/ PARAMETRI TECNICI	30
X/ GARANZIA	31

I / SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Modello	E-Walk
Dimensioni aperto	99 x 77-87 x 60 cm
Dimensioni piegato	72 x 77-87 x 28 cm
carico massimo	125 kg
Motore	2 x 250 W
Batteria	24 V / 10Ah / Litio
Autonomia	20 km
Ruote anteriori	8 pollici
Ruote posteriori	8 pollici
Pendenza massima	10°
Tempo di ricarica della batteria	4-6 ore
Spazio tra i braccioli	54 cm
Larghezza del sedile	45 cm
Profondità del sedile	30 cm
Sistema di frenata	Freni elettromagnetici
Peso netto (batteria esclusa)	17 kg
Peso totale con batteria	18 kg

II / MESSA IN SERVIZIO DELLA CARROZZINA




- Disimballare il deambulatore dai vari cartoni e plastiche protettive
- Assicurarsi che non rimangano parti sul fondo della plastica protezione prima di buttarlo via
- Utilizzando un taglierino o una pinza tagliente, tagliare i 2 Serflex che bloccano l'apertura del deambulatore
- Facendo riferimento alla parte di apertura dell'E-Walk, aprilo

Nella borsa sotto il sedile troverai i seguenti oggetti:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - 1 caricabatteria | - 1 kit di attrezzi |
| - 1 batteria da 10Ah | - Manuale d'uso |
| - 1 motore | |
- Installare il joystick all'estremità del bracciolo desiderato, regolarlo alla lunghezza desiderata.
 - Verificare che i collegamenti del deambulatore siano corretti
 - Liberare le ruote posteriori dalle plastiche protettive
 - Aprire i poggiatesta
 - Inserire la batteria
 - Quando il deambulatore è completamente aperto e collegato, seguire le seguenti istruzioni per una prima esperienza di successo con l'E-Walk. Consigliamo anche di controllare le ruote.
 - Caricare la batteria al massimo fin dal primo utilizzo

1. Installazione del joystick anteriore

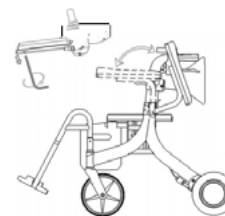

Rimuovere le viti del joystick con il kit di attrezzi.


Installare il joystick sul bracciolo destro.



Quindi regolare la lunghezza appropriata.



Stringere le viti per fissare la lunghezza.

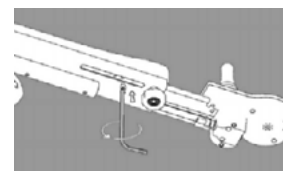



Reinstallare e serrare le viti sul joystick.

2. Installazione del joystick posteriore



Installare il joystick posteriore sul manubrio destro.


Far scorrere la tacca sotto il joystick posteriore nella tacca sul manubrio destro.

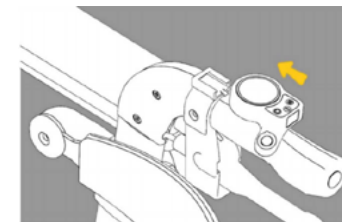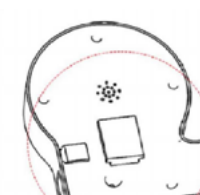

3. Connessione elettrica


Joystick anteriore

Per collegare il joystick anteriore alla batteria, individuare le prese di collegamento situate sul joystick e avvitarle in posizione.

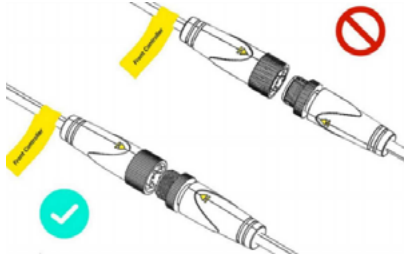


Joystick posteriore

Per collegare il joystick posteriore, cercare la connessione a spina situata sul joystick posteriore e il cavo di alimentazione sotto il sedile.

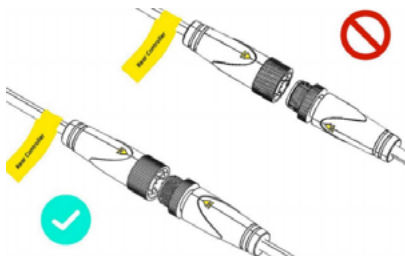


Allineare le frecce sui connettori, inserirli e serrare il dado.

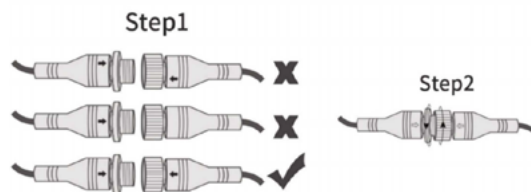


4. Batteria in carica

Collega il caricabatterie direttamente al joystick ANTERIORE

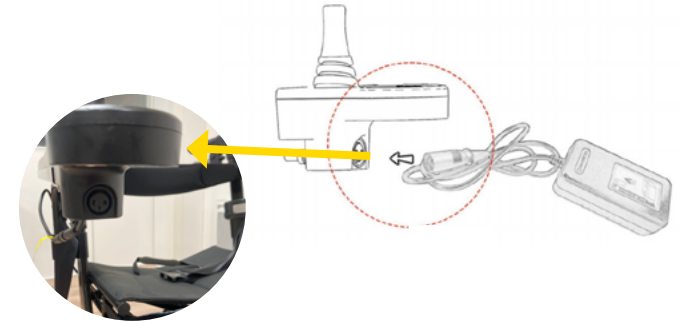

Non forzare insieme i collegamenti maschio e femmina. I perni piegati causeranno il malfunzionamento o il mancato funzionamento del deambulatore elettrico. Lascia caricare il deambulatore per 4-6 ore o fino a quando la spia del caricabatterie diventa verde.

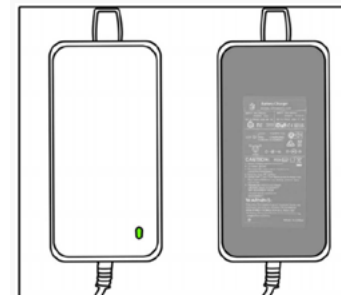

Spia del caricabatterie

ROSSO: La batteria è completamente scarica

ARANCIONE: la batteria è in carica

VERDE: la batteria è completamente carica

Istruzioni per la ricarica della batteria

- È imperativo utilizzare solo il caricabatteria al litio fornito da ErgoConcept con l'E-Walk. L'uso di qualsiasi altro caricabatterie è severamente vietato.
- Assicurarsi che la batteria sia installata nella custodia e che sia stabilito il collegamento elettrico tra la batteria e il cavo di collegamento del joystick.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente e correttamente. (con le frecce sui connettori maschio e femmina allineate).
- Assicurarsi che il caricabatterie e la batteria non si surriscaldino durante la ricarica della batteria, altrimenti ciò potrebbe causare danni o rischio di incendio.
- Se la batteria è installata in modo errato o i collegamenti non sono corretti, ciò influenzerà il funzionamento del deambulatore elettrico E-Walk e verrà emesso un avviso di errore.
- Il deambulatore elettrico E-Walk utilizza una batteria agli ioni di litio da 24 V 10 Ah.
- Il tempo medio di ricarica è compreso tra le 4 e le 6 ore, fare attenzione a non lasciare il caricabatterie collegato per un periodo di tempo prolungato, si consiglia vivamente di scollegarlo quando la batteria è completamente carica.
- Il caricabatteria deve essere protetto da eventuali contatti con acqua o muffe, o da urti violenti. Tenere il caricabatterie e il joystick lontano dall'umidità.
- Questa batteria è conforme agli standard FAA per i viaggi aerei, dovrà essere rimossa dal deambulatore e trasportata nel bagaglio a mano. È necessario informare in anticipo la compagnia aerea della batteria.
- Controlla la spia della batteria prima di ogni utilizzo per assicurarti di avere la potenza necessaria.
- Se la batteria è danneggiata, non maneggiarla senza guanti e occhiali protettivi.
- Se la batteria deve essere smaltita, individuare il luogo di riciclaggio idoneo più vicino e chiedere istruzioni.
- Non utilizzare caricabatterie di marche e tipi diversi quando si sostituisce la batteria. La batteria originale deve essere sostituita e tutte le batterie esistenti devono essere sostituite insieme. Non mescolare vecchio e nuovo.
- Gli elettrodi positivo e negativo della batteria non possono essere collegati con oggetti conduttivi come il metallo, che potrebbero causare cortocircuiti o scosse elettriche.
- Tenere lontano da materiali infiammabili. Non avvicinarsi o esporsi a fonti di calore, come fiamme libere o scintille. Durante il trasporto delle batterie, non collocarle accanto a materiale

infiammabile o combustibile.


- È vietato smontare la batteria senza autorizzazione.
- È vietato cortocircuitare la batteria o incendiarla per evitare incidenti dovuti a esplosioni.
- Consenti al tuo deambulatore di caricarsi per 6 ore con una carica completa. Quando la luce verde è accesa, significa che le batterie sono completamente cariche.
- Controllare i collegamenti della batteria per assicurarsi che non siano corrosi.
- Non lasciare che la batteria si congeli.
- La conservazione deve avvenire in una stanza con un'umidità inferiore all'80%. La batteria potrebbe danneggiarsi se esposta a temperature elevate o basse.

Il tuo deambulatore elettrico E-Walk ti verrà consegnato con le batterie, che dovrebbero durare circa 20km in condizioni operative normali. Si consiglia di utilizzare il deambulatore elettrico E-Walk finché le batterie non sono completamente scariche per ottenere la massima durata della batteria.


III / METODO DI APERTURA E PIEGATURA DELLA SEDIA

Apertura



Sulla parte superiore del sedile è presente una cinghia di rilascio di sicurezza.

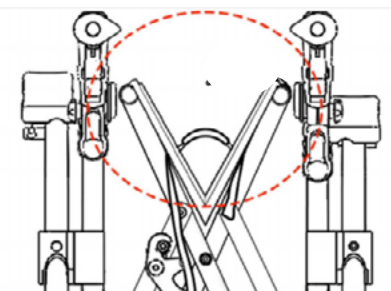

Solleva la maniglia di rilascio di sicurezza e il deambulatore elettrico E-Walk rilascerà il blocco di sicurezza sotto il sedile, permettendoti di aprirlo.

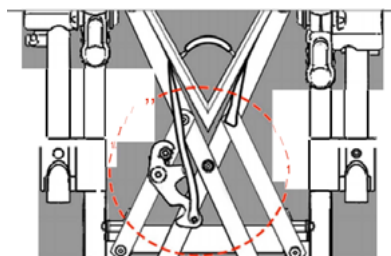




Una volta sollevata la cinghia di rilascio di sicurezza, il deambulatore inizierà a separarsi leggermente. È possibile rilasciare la maniglia e aprire il deambulatore, premendo su ciascun lato dei braccioli del sedile. Puoi assicurarti che il blocco di sicurezza sia inserito sollevando il deambulatore e controllando che non si pieghi. Lo schienale può essere ribaltato in avanti o all'indietro.

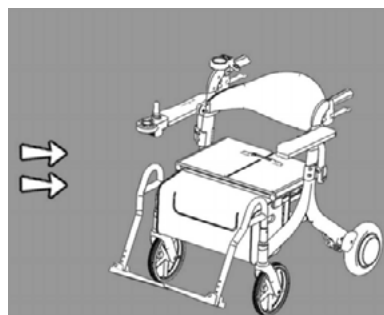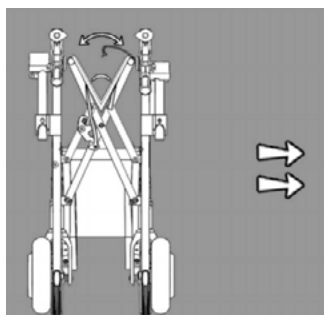



Piegatura

Per piegare il deambulatore, abbassare lo schienale quindi sollevare la maniglia di rilascio di sicurezza sul sedile per rilasciare il blocco di sicurezza situato sotto il sedile.

I braccioli del deambulatore possono essere spostati insieme per spostare il deambulatore nella posizione piegata.

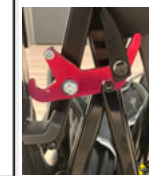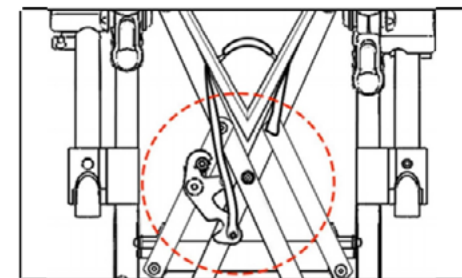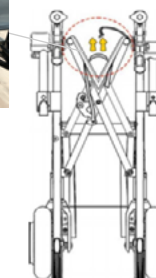

Sentirai il clic della clip di sicurezza in posizione quando il deambulatore sarà piegato correttamente e completamente.

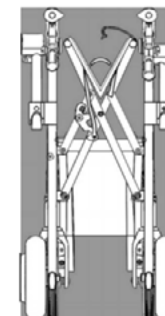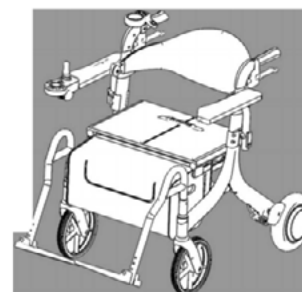


IV/ REGOLAZIONI DEI COMPONENTI

1. Retrazione dei braccioli

Un pulsante di rilascio del bracciolo si trova all'esterno di ciascun bracciolo.



Questa leva è nella posizione bloccata quando i braccioli sono abbassati. Non sarà possibile sollevare il bracciolo quando la leva del bracciolo è in posizione bloccata.

Premere la leva di rilascio del bracciolo, quindi sollevare il bracciolo verticalmente.

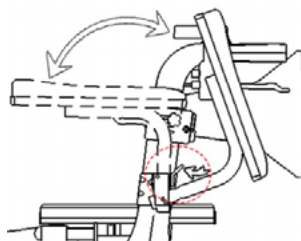


2. Regolazione in altezza delle manopole del manubrio

Il pulsante di rilascio dell'impugnatura del manubrio si trova sul retro di ciascun bracciolo. Premi il pulsante di rilascio e potrai sollevare ciascuna impugnatura del manubrio in modo indipendente.

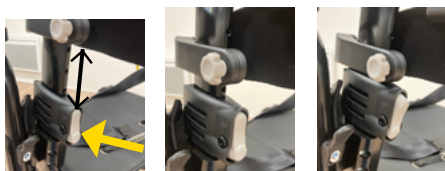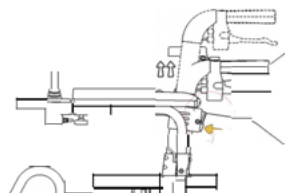

3. Regolazione in altezza dello schienale


Puoi anche regolare la fascia dello schienale verso l'alto o verso il basso secondo le tue preferenze utilizzando i pulsanti di regolazione sul lato dell'impugnatura del manubrio. Permette di far scorrere la striscia dello schienale verso l'alto o verso il basso.

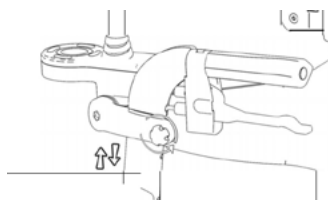

4. Freni a mano

Il deambulatore è dotato di freni a mano che possono essere utilizzati quando lo si utilizza come deambulatore o sedia a rotelle manuale.

I freni a mano si trovano appena sotto le impugnature del manubrio sinistro e destro.

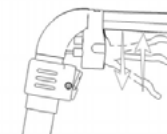

I freni possono anche essere bloccati premendo la leva del freno a mano finché non si blocca in posizione. Questo è consigliato per il trasferimento on/off del deambulatore. Si consiglia vivamente di bloccare il freno a mano quando il deambulatore elettrico sale e scende.



4. Poggipiedi

4.a Regolazione altezza



Per regolare l'altezza delle pedane, svitare la vite, regolare l'altezza desiderata (4 posizioni possibili) e riavvitare la paletta. Ripeti questa manipolazione sulla seconda tavolozza.

4.b Escamotage




Sollevando le pedane, riportarle nella posizione normale e aprire la pagaia. Controllare che la cinghia del tallone sia fissata correttamente.

Per ripiegarlo, ripiegare il bancale e sollevare la pedana, portandola all'esterno del deambulatore.

5. Il joystick

5a. Lunghezza del joystick


Allentare la vite sotto il joystick, regolare la lunghezza desiderata e riavvitare.

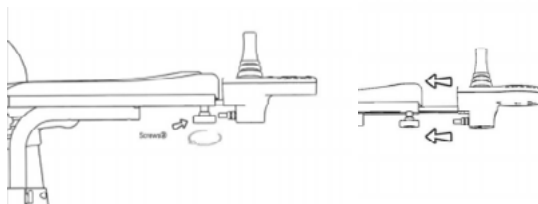

5b. Installazione del joystick a sinistra


Se si utilizza il joystick anteriore sul bracciolo sinistro, seguire i passaggi seguenti.

1. Sollevare il bracciolo. Utilizzando i cacciaviti, svitare le due viti del bracciolo.
2. Rimuovere la piastra in ferro dal bracciolo sinistro e installarla sul bracciolo destro.
3. Installare le due viti svitate sul bracciolo destro.
4. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le due viti situate nella parte inferiore del joystick anteriore. Rimuovere la piastra in ferro dal joystick anteriore e ruotare la piastra in ferro di 180°. Reinstallare le viti sul joystick anteriore.
5. Installare il joystick anteriore sul bracciolo sinistro. Fare riferimento all'installazione del joystick anteriore p7.

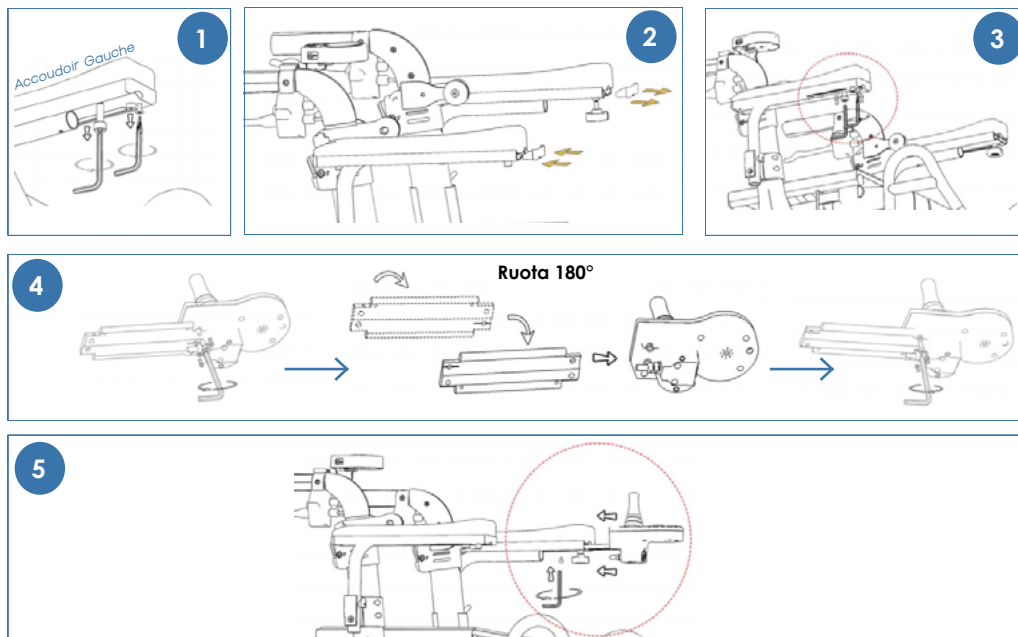

V / MODALITÀ DI GUIDA E DI FUNZIONAMENTO

1. Joystick anteriore

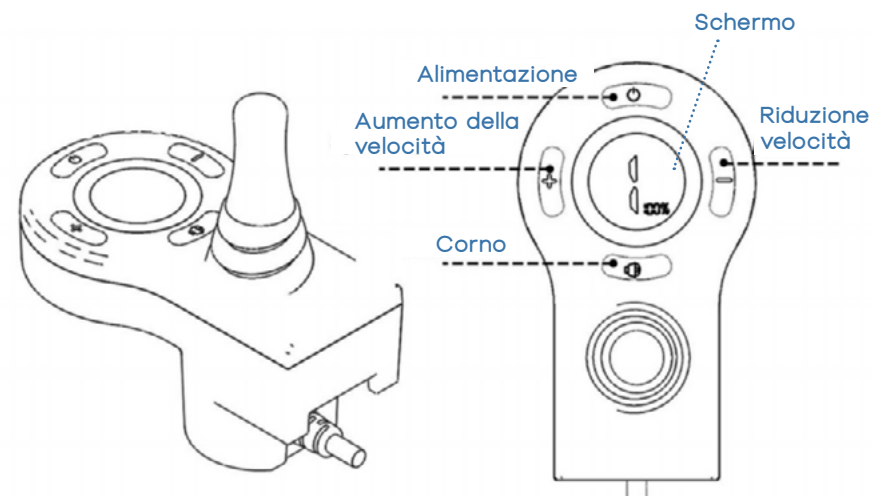

Il joystick anteriore è progettato per fornire tutte le informazioni necessarie per utilizzare l'E-Walk in sicurezza in modalità sedia a rotelle elettrica.



Il deambulatore elettrico E-Walk è progettato per essere sterzato con un joystick anteriore a 360 gradi. Esercitati a utilizzare il joystick per spostarti avanti e indietro. Pratico fare svolte a destra e a sinistra. Utilizzare sempre movimenti lenti e fluidi ed evitare movimenti a scatti con il joystick. Il controller del joystick anteriore ha 5 impostazioni di velocità e si muoverà a velocità fino a 6 km/h. Lo schermo LCD ti dirà in quale impostazione di velocità ti trovi e quanta durata rimane della batteria. Esercitati nelle operazioni in un ambiente sicuro e controllato per imparare come funziona il joystick, nonché le diverse velocità e manovrabilità. Quando giri, riduci la velocità per evitare qualsiasi potenziale ribaltamento o ribaltamento del deambulatore e regola la velocità in base alle tue esigenze.

Principali istruzioni di guida

Andare avanti:

Premere leggermente il joystick in avanti

Fermare:

Rilasciare il joystick

Per tornare indietro:

Premere leggermente indietro il joystick. (l'utente dovrà prestare particolare attenzione per anticipare i movimenti all'indietro ed evitare collisioni)

Voltare :

Premere leggermente il joystick verso destra o sinistra. (l'utente dovrà prestare particolare attenzione per anticipare i movimenti laterali ed evitare collisioni)

Guidare in curva:

Premere leggermente il joystick nella direzione della curva con una velocità adeguata

Evitare e aggirare gli ostacoli:

Premi leggermente il joystick per evitare e aggirare gli ostacoli. Adatta la tua velocità alla situazione.

2. Joystick posteriore



Modalità di blocco automatico

Il sistema si blocca automaticamente entro 5 secondi dal rilascio della maniglia e non può essere spostato. Lo schermo LCD visualizzerà "LL". Per sbloccare la funzione di blocco, tenere la maniglia e premere un pulsante qualsiasi sul display posteriore e la «LL» scomparirà e il deambulatore elettrico sarà sbloccato e pronto per l'uso.



Come calibrare

Se dopo l'accensione viene visualizzato il codice di errore «E-024», il deambulatore elettrico E-Walk deve essere ricalibrato utilizzando i seguenti passaggi:

1. Inizia posizionando correttamente l'E-Walk orizzontalmente con il joystick posteriore installato.
2. Tieni premuto il pulsante «Accensione»  sul joystick posteriore per 10 secondi finché il display LCD non visualizza «F4» e una notifica vocale ti informa che la sedia è pronta per essere calibrata.
3. Rilasciare il pulsante di accensione e la calibrazione dell'assetto verrà eseguita automaticamente.
4. Attendere il completamento del processo, quindi tornare al menu principale, la calibrazione dovrebbe essere completata.

Introduzione e utilizzo delle funzioni

1. Modalità di guida

- (1) Velocità di guida 6 km/h
- (2) Sono disponibili 5 modalità di guida veloce
- (3) La portata è di circa 20-25 km.

2. Attraversare un ostacolo

Selezionare la velocità C1-C3, tenere la maniglia per fermare il deambulatore elettrico multifunzione 3N1, premere con il pollice il pulsante step assist (potenza assistita) e la parte anteriore sollevata, si fermerà ad una certa angolazione per garantire la sicurezza dell'utente.

3. Modalità di assistenza elettrica:

C1-C3 vengono utilizzati per il trasporto di persone o oggetti. Modalità di resistenza: 01-03 per l'allenamento di riabilitazione dell'andatura. Se la velocità è troppo elevata durante l'uso, si verificherà la frenata di emergenza automatica.

4. Antiscivolo e anticaduta:

Quando si spinge, se la velocità del deambulatore è eccessiva, la frenata di emergenza automatica, lo schermo a cristalli liquidi visualizza «EE», rilasciare la maniglia, il dispositivo anticaduta posteriore viene rilasciato e «EE» scompare.

Operazione di controllo avanzato

Tenere premuti i pulsanti contemporaneamente per accedere alla modalità di impostazione corrispondente. Dopo essere entrati nella modalità di impostazione, se non viene eseguita alcuna operazione entro dieci secondi, si uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione;

Modalità impostazione utente: premere «+» e «», contemporaneamente e il contenuto dell'impostazione si riferisce alle impostazioni dei parametri utente.

Dopo essere entrati nella modalità di impostazione, cercare la voce di impostazione corrispondente premendo brevemente il pulsante «+» o «-».

Dopo aver trovato l'impostazione corrispondente, premere brevemente il pulsante «clacson». A questo punto, il contenuto delle impostazioni inizia a lampeggiare. Quando il contenuto del parametro inizia a lampeggiare, premere brevemente il pulsante «+» o «-» per modificare i parametri di impostazione;

Dopo aver regolato i parametri di regolazione, premere brevemente il pulsante «clacson» per confermare e uscire dalla regolazione e il contenuto della regolazione non lampeggerà più.


Premere a lungo il pulsante «» per uscire dalla modalità di impostazione. Dopo essere usciti dalla modalità di impostazione, riavviare il joystick e le impostazioni avranno effetto e rimarranno.

Visualizzazione della modalità di configurazione

A. Interfaccia delle impostazioni utente

- (1) La visualizzazione di «U» significa utente, indicando che è attualmente in modalità di configurazione utente.
- (2) I numeri sul lato sinistro della barra orizzontale rappresentano gli elementi di impostazione, mentre i numeri sul lato destro rappresentano i contenuti dell'impostazione. Il contenuto specifico è il seguente:

Impostazioni velocità	1-1		1-2		1-3	
	bassa velocità		velocità media		grande velocità	
Impostazioni dello sterzo	2-1		2-2		2-3	
	direzione debole		direzione media		grande direzione	
regolazione della compensazione della deviazione della ruota sinistra	3-0	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5
	nessuna compensazione della deviazione della ruota sinistra	compensazione della deflessione della ruota sinistra livello 1	compensazione della deflessione della ruota sinistra livello 2	compensazione della deflessione della ruota sinistra livello 3	compensazione della deflessione della ruota sinistra livello 4	compensazione della deflessione della ruota sinistra livello 5
regolazione della compensazione della deviazione della ruota destra	4-0	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
	nessuna compensazione della deviazione della ruota destra	compensazione della deflessione della ruota destra di livello 1	compensazione della deflessione della ruota destra di livello 2	compensazione della deflessione della ruota destra di livello 3	compensazione della deflessione della ruota destra di livello 4	compensazione della deflessione della ruota destra di livello 5
Impostazione del segnale acustico inverso	5-0			5-1		
	segnale acustico di inversione disabilitato			segnale acustico di retro-marcia attivato		

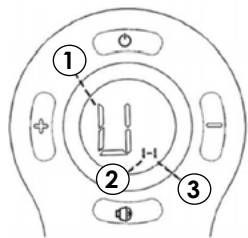

1. Modalità di impostazione utente
2. elemento di regolazione
3. Definire il contenuto



PUNTO DI VIGILANZA

Fare un piccolo passo:

Guidare lentamente la sedia verso il gradino e tenere il joystick in avanti mentre si attraversa. Il gradino non deve superare i 4 cm di altezza.

Guida in salita:

Il corpo deve essere leggermente inclinato in avanti per mantenere il baricentro in avanti e guidare ad una velocità adeguata. L'inclinazione della pendenza non deve superare i 10°.

Entrare e uscire dall'ascensore:

L'utente deve prestare particolare attenzione all'intervallo di tempo di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore al fine di evitare eventuali collisioni durante l'entrata o l'uscita dall'ascensore.

Traffico sui marciapiedi:

In città è obbligatorio circolare sui marciapiedi, è vietato circolare su strade o strade. Per attraversare è necessario utilizzare gli attraversamenti pedonali.

Attraversamenti pedonali:

Per attraversare le strade, utilizzare gli attraversamenti pedonali. Prestare particolare attenzione quando si guidano barche con marciapiede.

VI/ MANUTENZION

1 - L'utente deve controllare regolarmente viti e dadi (ogni 6 mesi). Se i gruppi sembrano allentati, assicurarsi di serrarli saldamente per garantire un utilizzo sicuro.

2 - Controllare la fluidità di rotazione delle ruote anteriori e posteriori (disinserite). Se presentano troppa resistenza, sostituire il cuscinetto a sfere.

3 - Controllare che i pneumatici, i braccioli e le altre parti in plastica non siano eccessivamente usurate. Se è così allora cambiarli.

4 - Verificare che le connessioni elettriche ed i connettori non siano ossidati, in caso contrario dovranno essere sostituiti.

5 - Assicurarsi che i gruppi avvitati siano funzionanti, se sembrano troppo allentati o presentano problemi di aggancio o sgancio, sostituirli urgentemente.

6 - La sostituzione dei vari elementi deve essere effettuata da un riparatore professionista, autorizzato da ErgoConcept o dal servizio di manutenzione ErgoConcept. Non sostituirli da soli.

VII / CONSIGLI GENERALI PER LA SICUREZZA



AVVERTIMENTO

- L'utente deve dimostrare la capacità di discernimento e giudizio necessari per utilizzare la sedia in sicurezza, nonché la capacità di controllare e padroneggiare la sedia.
- L'utente deve leggere questo manuale di istruzioni PRIMA di qualsiasi utilizzo e conservarlo se necessario.
- Nel joystick sono presenti componenti elettronici, evitare di premere i pulsanti quando è spento.
- Fare attenzione a non lasciare la sedia appoggiata sui manicotti laterali della batteria poiché ciò potrebbe causare danni alla batteria.



PUNTO DI VIGILANZA

- È vietato riporre la sedia in un ambiente troppo caldo o troppo freddo poiché ciò rischia di accorciare la vita della sedia. Evitare di conservare la batteria in un luogo troppo caldo, poiché esiste il rischio di incendio.
- Nel joystick sono presenti componenti elettronici, evitare di premere i pulsanti quando è spento.
- Fare attenzione a non lasciare la sedia appoggiata sui manicotti laterali della batteria poiché ciò potrebbe causare danni alla batteria.



ATTENZIONE

- Durante l'installazione sul sedile non appoggiarsi mai direttamente al joystick ma utilizzare il bracciolo.
- Fare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico della batteria quando lo si scollega.
- Assicurarsi che il cavo che collega il joystick alla batteria sia inserito nelle piccole clip situate lungo i braccioli per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento.
- È vietato l'uso della sedia in stato di ebbrezza.
- L'utente deve comprendere e conoscere le caratteristiche e le funzionalità specifiche della sedia ed esercitarsi ripetutamente su un pavimento piano e sicuro prima dell'uso quotidiano.
- Durante il periodo di familiarizzazione con le funzioni della sedia, l'utente deve essere accompagnato da una persona competente.
- Durante la chiusura e l'apertura, non inserire mai le mani o le dita nel sistema di chiusura della sedia.



ATTENZIONE



DIVIETO



ACCOMPAGNAMENTO

1 - Passaggio a livello:

È assolutamente vietato attraversare i binari senza essere accompagnati da persona competente. Attraversare un gradino troppo alto può causare incidenti di ribaltamento e lesioni gravi.

2 - Guida in pendenza:

La guida su una superficie con pendenza superiore al 10% (in salita o in discesa) può provocare ribaltamenti e lesioni gravi. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente quando si viaggia su fondi ripidi.

3 - Passaggi di attraversamento:

Superare un gradino troppo alto può causare incidenti di ribaltamento e gravi lesioni personali. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento dei gradini.

4- Semafori:

L'utilizzatore della sedia a rotelle deve prestare particolare attenzione al tempo impiegato dal semaforo per cambiare colore. La mancata osservanza di questo punto può provocare gravi lesioni personali. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

5 - Pericoli legati all'utilizzo di batterie scariche:

Il guasto della batteria dovuto alla mancata ricarica può verificarsi quando l'utente attraversa la strada e causare gravi incidenti. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

6 - Entrare e alzarsi dal letto:

Manovre inadeguate quando l'utente sale o scende dal letto possono causare gravi danni fisici. Se la situazione lo richiede, è obbligatoria la presenza di un accompagnatore competente per salire e scendere dal letto se la situazione lo richiede.

7 - Riparazione:

All'utente (o a qualsiasi persona non autorizzata) è vietato riparare da soli la propria sedia a rotelle; ciò potrebbe causare danni permanenti alla sedia a rotelle e causare gravi lesioni personali. Ciò invalida anche tutte le forme di garanzia del produttore. La sedia deve essere riparata da un riparatore professionista autorizzato o dal servizio di manutenzione ErgoConcept.

8 - Sicurezza dei bambini:

È assolutamente vietato lasciare che un bambino giochi con il prodotto, ciò potrebbe causare danni permanenti alla sedia e causare gravi lesioni personali. Ciò invalida anche tutte le forme di garanzia del produttore. La sedia deve essere conservata in un luogo inaccessibile ai bambini. È essenziale notare che la sedia non deve essere utilizzata come seggiolino per auto.

9 - Movimentazione:

È assolutamente vietato afferrare le batterie o la loro guaina per sollevare o spostare la sedia. Ciò può causare danni permanenti alla sedia e causare gravi lesioni personali. Le persone che sollevano o spostano la sedia devono afferrarla per il telaio.

10 - Pulizia:

Spruzzare acqua direttamente sulla sedia a rotelle elettrica può causare danni permanenti alla sedia a rotelle e causare gravi lesioni personali. Se necessario, pulire la sedia con un panno pulito e umido.



- Le batterie devono essere protette da qualsiasi contatto con acqua, umidità o muffe, questo può causare malfunzionamenti e cortocircuiti.
- Se si verifica un cortocircuito, potrebbe verificarsi un arco elettrico che potrebbe causare ustioni o incendi.
- Le batterie devono essere protette dal contatto con il fuoco o con forti fonti di calore, altrimenti potrebbero verificarsi un'esplosione o un incendio.
- È vietato smontare le batterie o sottoporle a urti violenti, ciò potrebbe causare l'accensione delle batterie o provocare un incendio.
- È vietato esporre le batterie ad un ambiente troppo caldo o estremamente freddo, poiché ciò potrebbe ridurre le prestazioni delle batterie o danneggiarle.
- Si consiglia vivamente di non lasciare le batterie sul ripiano posteriore del veicolo, ciò potrebbe incendiare le batterie o provocare un incendio.
- Se le batterie si surriscaldano, si deformano o emettono un odore insolito durante l'uso o la ricarica, è necessario interrompere immediatamente la ricarica o l'utilizzo, altrimenti le batterie potrebbero danneggiarsi o incendiarsi.
- In caso di perdita delle batterie, tenerle lontane da qualsiasi fonte incandescente o di calore, altrimenti ciò potrebbe causare l'incendio o l'esplosione delle batterie.
- Non lasciare mai che un bambino maneggi o giochi con le batterie e conservarle in un luogo inaccessibile ai bambini.
- Il caricabatterie e le batterie del kit di caricamento facile non devono essere coperti da un panno o da qualsiasi altro oggetto durante la ricarica. Devono essere collocati in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
- Anche inutilizzate, le batterie agli Ioni di Litio hanno la particolarità di scaricarsi. Pertanto non dovrebbero essere conservati per lunghi periodi a basso carico, poiché ciò causerebbe una riduzione delle prestazioni.
- Se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, le batterie devono essere completamente ricaricate.
- Devono essere ricaricate almeno una volta ogni tre mesi, per preservarne le prestazioni.
- Le batterie agli ioni di litio sono riciclabili. Al momento della sostituzione delle batterie, l'utente restituirà le batterie Ergoconcept usate per il riciclaggio.

VII/ POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI

Codice di errore	Cause	Soluzioni
E0001	Malf funzionamento del joystick anteriore	Quando si avvia il deambulatore, rilasciare il joystick: se l'anomalia persiste, contattare il proprio rivenditore per sostituire il joystick anteriore.
E0002	Malf funzionamento del motore sinistro	Controllare se l'uscita del motore sinistro è danneggiata. Se danneggiato, sostituire il motore. Controllare se la porta di collegamento del motore sinistro è inserita correttamente e la connessione è salda e sicura. Se il motore 1111 non supera il motore, deve essere sostituito.
E0003	Malf funzionamento del motore sinistro e destro	Controllare se le uscite del motore sinistro e destro sono danneggiate. Se danneggiato, sostituire il motore. Controllare se le porte di collegamento del motore sinistro e destro sono inserite correttamente e la connessione è salda e sicura. Se nessuno dei due. Tra i precedenti, il motore usato è il motore che deve essere sostituito.
E0004	Malf funzionamento del motore destro	Controllare se la spina del motore destro è danneggiata. Se danneggiato, sostituire il motore. Controllare se la porta di connessione del motore destro è inserita correttamente e la connessione è sicura. Se nessuno degli elementi sopra indicati deve essere sostituito, è necessario sostituire il motore.
E0008	Errore di rilevamento della corrente del motore sinistro	Contattare il distributore per sostituire il driver
E0010	Erreur de détection de courant du moteur droit	Contattare il distributore per sostituire il driver
E0020	Il rilevamento della carica della batteria non è corretto	Contattare il distributore per sostituire il driver
E0040	Malf funzionamento 15 V	Contattare il distributore per sostituire il driver
E0800	Errore di comunicazione del comando in avanti	Contattare il distributore per sostituire il controller anteriore
E-013	Malf funzionamento del motore sinistro	Contattare il distributore per sostituire il motore sinistro
E-014	Malf funzionamento del motore destro	Contattare il distributore per sostituire il motore destro
E-015	malf funzionamento del motore sinistro e destro	Contattare il distributore per sostituire il motore sinistro e destro
E-016	Malf funzionamento del MOS del motore sinistro	Contattare il distributore per sostituire il driver
E-017	Malf funzionamento del MOS del motore destro	Contattare il distributore per sostituire il driver
E-018	Malf funzionamento del MOS del motore sinistro e destro	Contattare il distributore per sostituire il driver
E-021	Errore di comunicazione dei comandi posteriori	Contattare il distributore per sostituire il controller posteriore
EE	Allarme anticaduta	Rilasciare la maniglia, si sblocca l'anticaduta posteriore e la scritta "EE" scompare
E-023	Sensore di assetto anomalo	Contattare il distributore per sostituire il controller posteriore intelligente
E-024	Calibrazione dell'assetto del veicolo	Si prega di leggere il manuale utente: come calibrare
E-025	Il sensore di rilevamento dell'adesione è anomalo	Contattare il distributore per sostituire il controller posteriore
E-026	Il sensore di rilevamento dell'adesione non è calibrato	Contattare il distributore per sostituire il controller posteriore
E027	Il touch screen è anomalo	Contattare il distributore per sostituire il controller posteriore

IX/ CONSERVAZIONE DEL DEAMBULATORE

Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto.

Non conservarlo a temperature estreme. Se non può essere conservata nelle condizioni sopra indicate, la sedia a rotelle potrebbe arrugginarsi e danneggiare l'impianto elettrico.

Se si scopre un problema, contattare il rivenditore o il distributore autorizzato locale per ricevere assistenza.

- È vietato riporre il deambulatore in un ambiente troppo caldo o troppo freddo poiché si rischia di accorciare la vita del deambulatore. Evitare di conservare la batteria in un luogo troppo caldo, poiché esiste il rischio di incendio.

- Nel joystick sono presenti componenti elettronici, evitare di premere i pulsanti quando è spento.

- Evitare temperature estreme e non consentire il congelamento della batteria o del caricabatterie. Non tentare di caricare la batteria se è congelata a causa di condizioni meteorologiche estreme, ma lasciarla scongelare per diverse ore.

- Caricare completamente la batteria prima di riporla.

- Rimuovere la batteria dal deambulatore.

X/ PARAMETRI TECNICI

Tensione del motore	24V
Potere	2 x 250W
Batteria	Ioni di litio
Potenza di carica	AC100-240V 50/60HZ
Carica batteria	10Ah
Indicatore di tensione	LED

AVVERTIMENTO

1. Rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili del tipo LI-ION da 24 V, altri tipi potrebbero esplodere. È obbligatorio utilizzare esclusivamente il caricabatteria al litio fornito da ErgoConcept. L'uso di qualsiasi altro caricabatterie è severamente vietato.
2. Gas esplosivi. evitare fiamme e scintille. garantire un'adeguata ventilazione durante la ricarica.
3. Scollegare l'alimentazione prima di effettuare o scollegare i collegamenti alla batteria.
4. Prima della ricarica leggere le istruzioni.

Istruzioni per il caricabatterie:

- LED verde: batteria carica
- LED arancione: batteria in carica
- LED rosso: batteria scarica

X/ GARANZIA

Elément	Durée de garantie	Remarque
Telaio	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Motore	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Batteria al litio	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.
Controller	2 anni	Danni non causati intenzionalmente secondo le linee guida di questa guida per l'utente.

Per richiedere la garanzia del produttore sullo Deambulatore E-WALK, è indispensabile contattare il vostro rivenditore, che si occuperà degli scambi con ErgoConcept..



Grazie per la tua fiducia

35 rue du petit bois
Edificio D
69440 Mornant
FRANCIA

www.ergoconcept.it

